

Made in USA



Effektiv fjernelse af kirurgisk røg

# miniSQUAIR

## Anvendelsesområde:

miniSquair™ er et produkt til fjernelse af kirurgisk røg. Det appliceres på patientens tørre, preparerede hud eller på afdækningen og er beregnet til anvendelse ved åbne kirurgiske indgreb, hvor evakuering af røg er ønskværdig. Evakueringsproduktets slange tilsluttes direkte til den modtagende port på ULPA- filterdelen af et røggasudsug eller direkte på porten til et centralt udsug.

miniSquair™ er en indfangningsanordning til at evakuere røg, partikler, nanopartikler mm. Anvendes sammen med et (vakuum) sug. Ønsket flow er >500 l/min. (17-32 ft<sup>3</sup>/min hvilket modsvarer 500-900 l/min). miniSQUAIR kan anvendes med alle forekommende sugeanordninger til operationsstuen som har sufficient sugekraft.

## Advarsel:

- Sterile, med mindre pakningen er skadet eller har været åbnet.
- Er kun beregnet for engangsbrug. Må ikke genanvendes.
- Bortskaffes i overensstemmelse med sygehuset standarder for risikoaffald.
- Er miniSQUAIR® fyldt med blod kan lufflowet reduceres, hvilket kan mf at den skal erstattes med en ny.

## Kontraindikationer:

Der findes i dagligt brug, ingen kendte kontraindikationer.

## Brugsanvisning:

Den frie ende af den 26 mm harmonikaslangen er forsynet med en 25 mm ID spiraladapter som kan tilsluttes standard konnektoren på de fleste ULPA-filtre. Er der en hunkonnektor på ULPA filtret, fjernes spiraladapteren og sæt adapteren på ULPA-filtret.

Anvend aseptisk teknik, Pakningen åbnes og påsæt MiniSQUAIR® på aftalte plads. Minisquair kan tilklippes så den passer til operationsfeltet.

For mere information se; <http://nascentsurgical.com/minisquair-surgical-smoke-evacuation-system-2/instructions-use/>



Alle medicinske produkter, indpakninger og tilbehør må bortskaffes / destrueres i overensstemmelse med dansk lovgivning.

**HBI**medical  
Equipment you can trust

HBImedical, Nørrevej 70B, 3070 Snekkerten  
tlf +45 22181168 - e-mail: [info@hbimedical.dk](mailto:info@hbimedical.dk)  
hjemmeside: [www.hbimedical.dk/](http://www.hbimedical.dk/) [www.hbimedical.com](http://www.hbimedical.com)