

Made in EU

EMOTEC
EMOTEC

Slurp sugeslange

Slurp sugeslange anvendes når der er brug for et dobbelt sugesystem.

1. (1) Tilslut til sugesystem.
2. Vacuumventil (2) tilsluttes sugekateter.
3. Klemme (3) anvendes når der skal suges mindre end 20-30 kPa, vakuumventilen lukker ikke. (1) bruges såfremt suget skal lukkes.
4. Tilsluttes sugebeholder.

Anbefalet vacuum er ca 40 kPa eller efter behov. 1 kPa = 7,5 mmHg
Skift sugeslangen hvert døgn for at undgå bakterie vækst.
Har I spørgsmål, ring venligst for information.

