

Made in EU

EMOTEC  
EMOTEC

# Lukket ventrikelskyllesæt

- Dansk vejledning
- Giver bedre arbejdsmiljø
- 5000 ml opsamlingspose
- 2000 ml pose til skyllevæske - kan genfyldes
- Lukket system, mindsker smitterisiko
- Kan tilsluttes alle typer ventrikelsonder
- Har transparent opsamlingspose, hvilket giver mulighed for at se eventuelle pillerester etc.



**HBI**medical  
Equipment you can trust

HBImedical, Nørrevej 70B, 3070 Snekkerten  
tlf +45 22181168 - e-mail: [info@hbimedical.dk](mailto:info@hbimedical.dk)  
hjemmeside: [www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com](http://www.hbimedical.dk/www.hbimedical.com)



## Følgende skal bruges til ventrikelskylling:

- 1 stk "Sistema per lavanda gastrica" V-kit II
- Ventrikelsonde



## Sådan gør du:

1. Før den hvide klemme ned til opsamlingsposen (5000 ml / 2000 ml) og luk den.
2. Før den røde klemme så tæt på sondetilslutningen som muligt og luk den.
3. Fyld skyllevæskeposen med den ønskede mængde vand (måleenhed står på posen).
4. Opsamlingsposen placeres lavt, med måleskalaen synlig.
5. Begge klemmer åbnes, hold tommelfingeren for sondetilslutningen og fyld slangesættet for at skabe en hævert effekt.
6. Luk begge klemmer.
7. Tilslut sonden.

Ventrikelskyllesættet er nu klar og kan anvendes.